


Commencez :

- Ce produit dispose de deux sources d'alimentation : un adaptateur d'alimentation externe et une batterie interne.
 - Insérez l'adaptateur électrique horizontalement dans le port d'alimentation.
- Connexion de verrouillage**
 - Alignez les points rouges, sinon le verrouillage sera endommagé.
- Connexion fibre optique et ouverture laser**
 - Retirez le couvercle anti-poussière et insérez la fibre optique horizontalement dans l'ouverture du laser.
 - Serrez-le, sinon l'appareil ne fonctionnera pas.
- Connexion de l'interrupteur tactile et de l'interface de l'interrupteur tactile**
 - Alignez le point rouge de la commande tactile avec celui du port de la commande tactile, puis insérez-le dans l'interface
- Actionnez l'interrupteur marche/arrêt.
- Entrez le code d'accès : 0000

Commencez un traitement ADT :

- Sélectionner l'espèce
- Sélectionnez la catégorie > État > Partie du corps > Couleur du pelage > Chronicité > Poids (Select Category > Condition > Body Part > Coat Color > Chronicity > Weight)
- Mettez des lunettes de protection
- Sélectionnez **Lens (la lentille)**
- Appuyez sur **START**
- Appuyez sur l'interrupteur au doigt pour activer le traitement.

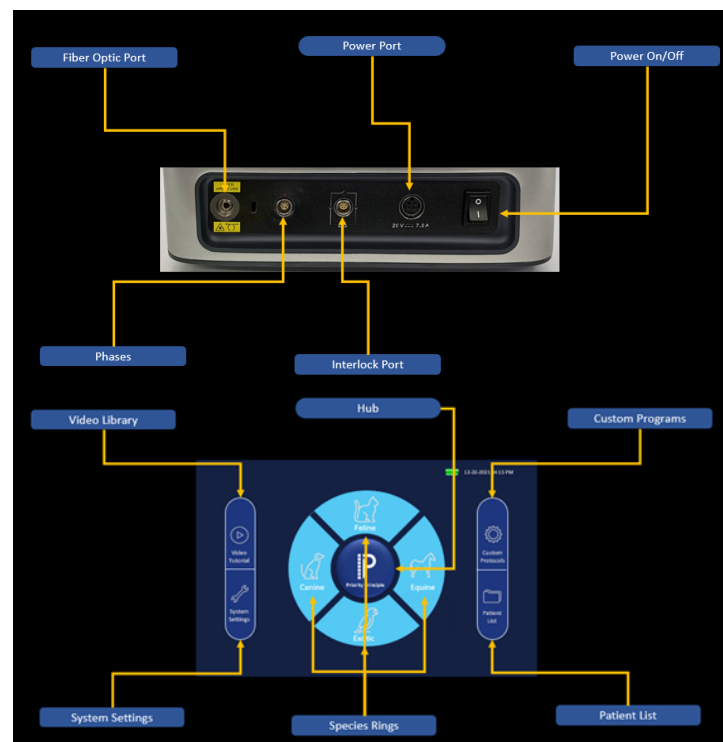

Navigation:

- Centre Hub:
 - Anneau des espèces**
 - Hub: Priority Principle (Principe de priorité)**
- Côté gauche:
 - Video Library (vidéothèque)**
 - System Settings (Paramètres du système)**
- Côté droit:
 - Custom Protocols (Protocoles personnalisés)**
 - Jusqu'à 100 protocoles.
 - Démarrage rapide des protocoles enregistrés.
 - N'utilise pas le dosage intelligent.
 - Patient List (Liste des patients)**
 - Jusqu'à 3 000 dossiers de patients.
 - Recherche par espèce, nom du patient, propriétaire ou numéro de contact.

Protocoles ADT	Principe de priorité	Manuel
ADT modifiera la dose (puissance et durée) en fonction des données cliniques	10 préréglages basés sur le principe de priorité basé sur les symptômes, le moyen le plus simple et le plus facile d'obtenir des résultats.	Permet aux fournisseurs de combiner l'une des 4 longueurs d'onde pour créer des protocoles uniques et personnalisés basés sur des études cliniques et leur efficacité.
Category → Condition → Body Part → Coat Color → Chronicity → Weight (Catégorie - Condition - Partie du corps - Couleur du pelage - Chronicité - Poids)	La dose est modifiée par l'animal	Peut fonctionner entièrement en mode onde continue (CW) ou pulsé avec la plus large gamme de paramètres d'impulsion (de 0 Hz ou CW à 20 000 Hz).
Canin, Félin, Équin, Exotique	Canin, Félin, Équin, Exotique	Personnalisé

Début du traitement de principe de priorité :

- Activez *Priority Principle* en appuyant sur le **HUB** central
- Appuyez sur **RING** pour sélectionner l'espèce
- Choisir **Priority**
- Mettez des lunettes de protection
- Selectionnez **Lens**
- Appuyez sur **START**
- Appuyez sur l'interrupteur au doigt **Finger Switch** pour activer le traitement.

Zoom	Massage	Massage Plus	Plus
3 – 4 cm ² Non-Contact Scanning Small Animal	4 cm ² Contact Point – Point Small Animal	20 cm ² Contact Point – Point Large Animal	20 cm ² Non-Contact Scanning Large Animal